

Eletrodos de ECG Precordiais



 Leia as Instruções de Uso antes de utilizar o produto.

O cinto de Eletrodos de ECG Precordiais MD® é um acessório reutilizável destinado a ser utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos para exames de ECG em repouso de 12 derivações. Modelo uso adulto. Não estéril.

AVISOS E CUIDADOS

Não utilizar os Eletrodos de ECG Precordiais MD® para outra finalidade além do uso pretendido.

REMOVA O DISPOSITIVO ANTES DE REALIZAR DESFIBRILAÇÃO.

O cinto de Eletrodos de ECG Precordiais MD destina a ser utilizado para exames de ECG em repouso. O produto não deve permanecer próximo a equipamentos geradores de campo eletromagnético.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize o cinto de Eletrodos de ECG Precordiais MD® em pele irritada ou lesionada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cinto de Eletrodos de ECG Precordiais MD® é um sistema de eletrodos de ECG moldados em um silicone hiperflexível semelhante aos eletrodos precordiais ECG V1-V6. O cinto de Eletrodos de ECG Precordiais MD® pode ser utilizado em homens e mulheres, é flexível e ajustável em todos os formatos e tamanhos corporais. Ao ser posicionado, o cinto se estende até as proporções exigidas e a distância entre os eletrodos é automaticamente ajustada. Este produto pode ser conectado a qualquer cabo paciente padrão para ECG.

MODO DE USO

É necessário que o paciente esteja relaxado e deitado confortavelmente em uma superfície plana, sem tensionar os músculos. Umedeça os eletrodos com água, bem como a região da pele que entrará em contato com os eletrodos. Se a pele estiver com creme, é necessário removê-lo com álcool. Utilize um gel condutor em regiões que contenham muitos pelos.

Aplique o cinto ajustando as duas alças de forma simétrica de ambos os lados e de acordo com o comprimento desejado. Posicione os eletrodos V1 e V2 em ambos os lados do osso esterno, na altura do quarto espaço intercostal. Ajuste até o V6 atingir a linha axilar média. Desta forma, os demais eletrodos estarão devidamente posicionados. Em seguida, colocar os braços do paciente sobre as alças e afivelar o cinto sobre o meio do tórax acima dos eletrodos V1 e V2 e assegurar que todos os eletrodos estejam em contato com a pele. Ajuste as tiras, se necessário.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpe o cinto com desinfetante de uso médico após cada utilização. **ATENÇÃO:** Não utilize desinfetantes que contêm petróleo.

GARANTIA

Garantimos que o produto quando novo está isento de defeitos originais de material ou mão-de-obra e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do produto é de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, tendo início na data de compra do produto, mediante NF de compra.

A garantia é atribuída ao comprador original e não pode ser cedida ou transferida a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada e informe o modelo do aparelho, o número de série, a data de compra e uma breve explicação do defeito do produto.

SIMBOLOGIA

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Consulte as Instruções de Uso.		Data de Fabricação
	Número de Série		Não Estéril
	Código de Referência		Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrônico Não descarte em lixo comum doméstico. Procure o centro de coleta mais próximo de sua região.
	Fabricante		