



OFTALMOSCÓPIO  
digital indireto



EyeScope

Guia de Instalação do Adaptador para Smartphone

## POSICIONANDO O SMARTPHONE

1. Deslize o suporte do smartphone o suficiente para que assim o smartphone possa ser inserido.



### ⚠ Atenção!

• Caso o smartphone possua mais de uma câmera no mesmo aparelho, certifique-se qual a câmera em funcionamento para encaixá-la com a abertura do adaptador.

2. Posicione o câmera do smartphone, deslizando para cima, baixo, esquerda ou direita, até a câmera estiver alinhada na abertura do adaptador.

3. Após alinhar a câmera, mantenha ambos os lados do adaptador pressionados contra o smartphone.

4. Gire o botão do adaptador no sentido horário até que se obtenha uma fixação firme o suficiente para segurar o smartphone.

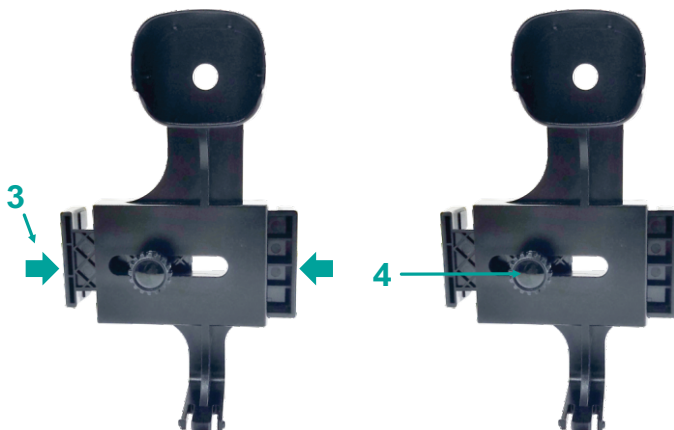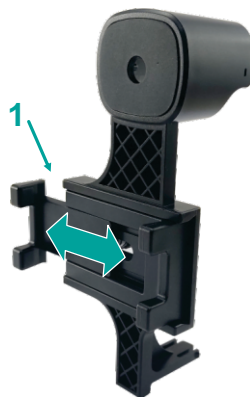


### ⚠ Atenção!

• Segure o smartphone firmemente para evitar a queda do aparelho durante o processo.

## OBSERVAÇÕES

- 1.O botão deve-se inserir para garantir a firmeza e estabilidade do smartphone no adaptador.
- 2.Deve-se acoplar o botão junto com arruela, conforme indicação ao lado a base.

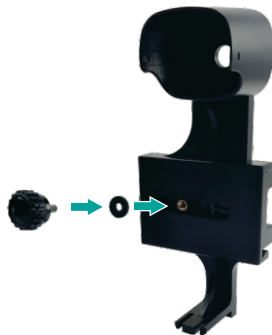

## ACOPLAMENTO


- 1.Acople o adaptador de smartphone no **Oftalmoscópio Digital Indireto EyeScope**.
- 2.Empurre o adaptador até acoplar no encaixe.




- 3.Após encaixar o adaptador no aparelho, verifique se a câmera está posicionada na abertura do adaptador.
- 4.Verificar se a tela está em condição ideal para visualização.



Exemplo de condição ideal da imagem.

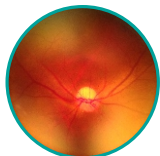

Exemplo de condições não desejáveis das imagens.

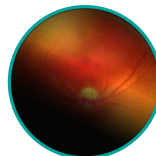



**WikiOptics Inc.**

Room 205, 120, Heungdeokjungang-ro  
Yongin-si - Gyeonggi-do  
Coreia do Sull



**Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda**

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Júlio Bartolomeu Tabora Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba – PR  
Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294  
Registro ANVISA nº 80070210088

**Suporte Técnico**

e-mail: [suporte@macrosul.com](mailto:suporte@macrosul.com)  
Site: [www.macrosul.com](http://www.macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8344

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

e-mail: [sac@macrosul.com](mailto:sac@macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8300